

Leggero[®]



Více jazyků k dispozici na: www.leggero.ch

Více informací na: www.odpruzeni.cz

Příslušenství


• *Joggingové kolo*

Brüggli Industrie
Hofstrasse 5
CH-8590 Romanshorn
T +41 71 466 95 95
F +41 71 466 95 96
info@leggero.ch
www.leggero.ch

DOKOV spol.s.r.o.
Staré Hodějovice 276
37008 České Budějovice
T +420 773 796 858
info@odpruzeni.cz
www.ODPRUZENI.cz

Leggero joggingové kolo

Balení

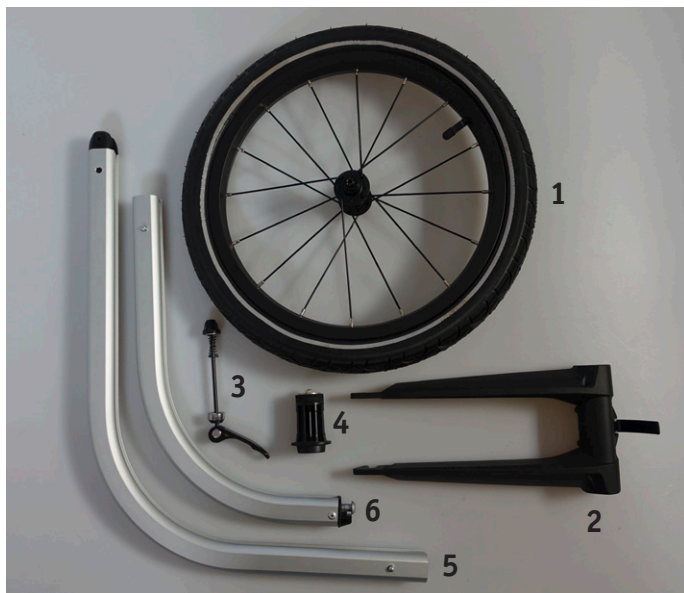

Č.	Označení	Počet kusů
1	Kolo 16x1.50"	1
2	Jogingová vidlice	1
3	Rychloupínací šroub	1
4	Čep	1
5	Levé joggingové rameno (výměna oje)	1
6	Pravé joggingové rameno	1

Pokyny k instalaci

Dodržujte následující pokyny:



- 1) Vložte čep do otvoru umístěného na přední straně vozíku. Poté utáhněte šroub šestihranu a zkontrolujte, jestli čep pevně sedí v otvoru.



POZNÁMKA



Pokud se šroub otáčí: vyjměte čep, přidržte gumový kotouč jednou rukou a lehce utáhněte šroub. Pokud gumový kotouč drží pevně, šroub se nemůže otáčet.

2) Namontujte joggingovou vidlici na delší joggingové rameno (se zámkem oje), jak je znázorněno na obrázku. Suňte rameno do otvoru dokud neuslyšíte cvaknutí. Zasunuté rameno zajištěte zámkem.

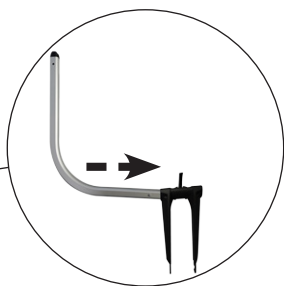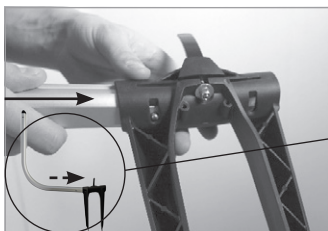

!!! POZNÁMKA k vozíku Leggero Enso !!!

Před zasunutím joggingového ramena je nutné vytáhnout oranžový pojistný kolík (1) a po zasunutí ramena jej opět zafixovat. Při vyndávání ramena kolík opět vysuňte (1) a zmáčkněte vedle umístěné oranžové tlačítko (2).

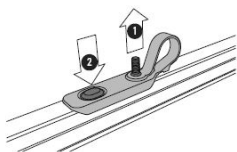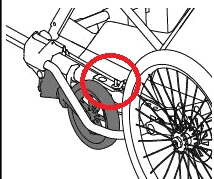

- 3) Nyní zasuněte druhé joggingové rameno do otvoru s čepem a zároveň do joggingové vidlice, opět dokud neuslyšíte cvaknutí. Uzavřete rychloupínacím šroubem.



- 4) Nyní vložte do joggingové vidlice kolo a dotáhněte rychloupínací šroub odpovídajícím způsobem. Zkontrolujte pevnost celé namontované konstrukce.



Namontujte kolo ve směru jízdy.

5) Nastavení stopy (dráhy)

Stopa je nastavena z výroby!

Přímý průběh dráhy lze snadno nastavit pomocí šroubu.

- Pokud vozík táhne doleva, zatočte šroub lehce dovnitř.
- Pokud vozík táhne doprava, vytočte šroub lehce ven.



6) Oj při nepoužívání

Oj může být na vozíku umístěna i pokud není používána. Stačí ji zajistit jako na obrázku.

