

## DOPORUČENÍ:


Doporučujeme vozík rozložit do přepravní pozice pro co nejlepší přístup.

## DEMONTÁŽ

Vyšroubujte a vyjměte šrouby z předního rámu pomocí klíče TORX. Pozor na podložky pod hlavou šroubu a pod maticí



Následně vysuňte SYNCHRONLOCK z rámové trubky. Trubku i SYNCHRONLOCK očistěte a následně ošetřete olejovým sprejem. Doporučujeme silikonový sprej, nouzově sprej WD-40 (má nižší viskozitu). Poté SYNCHRONLOCK patronu vložte zpět a zajistěte šrouby. Šroub prochází v místě za pružinou. Dotáhněte s citem, aby nedošlo k deformaci trubky rámu.

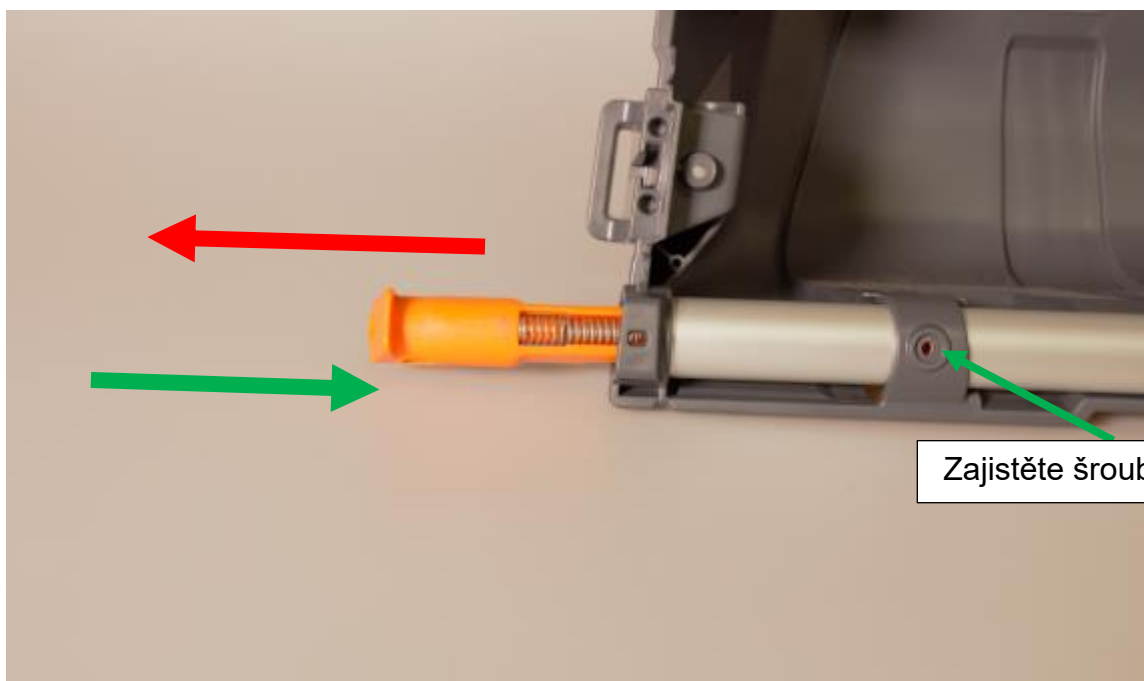

Zajistěte šroubem